

# SR PHONARES<sup>®</sup>

**FormSelector**

CAPOLAVORI D'ARTE MODERNA...  
... OLTRE L'ESTETICA E LA FUNZIONE

ivoclar<sup>®</sup>  
vivadent<sup>®</sup>

passion vision innovation




FormSelector è una componente importante del BPS, il sistema protesico è orientato al futuro ed offre una consulenza professionale da parte dei consulenti BPS.

Approfitti dei vantaggi di questo sistema nel Suo lavoro quotidiano e ne tragga i benefici.

Consulti per maggiori informazioni il sito [www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it)



**BPS**<sup>®</sup>

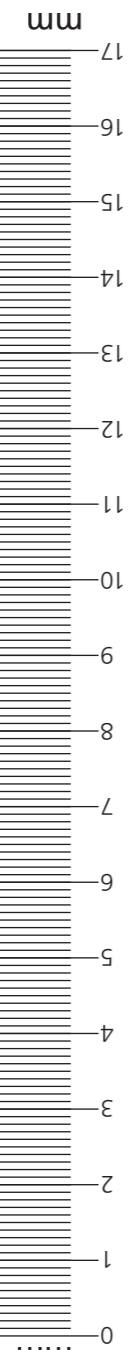

# FormSelector

Con l'SR PHONARES-FormSelector si può scegliere la corretta forma anteriore in modo semplice, rapido e mirato.

La presentazione del FormSelector è quella di un campionario che presenta le dimensioni di ogni forma anteriore superiore disponibile, in ordine di larghezza (small, medium, large), forma (soft, bold) secondo il grado di abrasione. Questa disposizione permette all'odontoiatra, una volta scelto il gruppo di riferimento, d'accostare le schede al viso del paziente per avere un'indicazione nella scelta della forma denti all'odontotecnico.

*Da disinfettare solo in superficie*



## FASE 1

Rilevare la distanza tra le ali del naso con l'ausilio del FacialMeter. Nella tabella INTER-ALA potrà scegliere l'idonea dimensione del dente.


## FASE 2

Scegliere dal gruppo identificato la forma più idonea fra soft e bold secondo la forma del viso.

## FASE 3

Selezionare i denti più idonei all'età del paziente, secondo il decorso incisale e vestibolare dei denti SR PHONARES NHC.

## YOUTHFUL

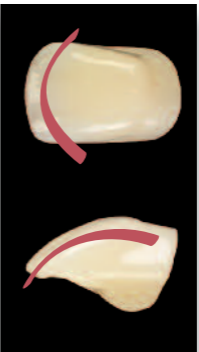

### Nessuna abrasione

- Margine incisale non abraso
- Convessità vestibolare accentuata

## UNIVERSAL



### Minima abrasione

- Leggere abrasioni del margine incisale
- Convessità vestibolare meno accentuata

## MATURE



### Forte abrasione

- Abrasione accentuata del margine incisale
- Minima convessità vestibolare



ivoclar  
vivadent®


Facial Meter

---

---

INTER-ALA

	Large	Medium	Small
<b>SOFT</b>	S63 S73 S83	S62 S72 S82	S61 S71 S81
<b>BOLD</b>	B63 B73 B83	B62 B72 B82	B61 B71 B81

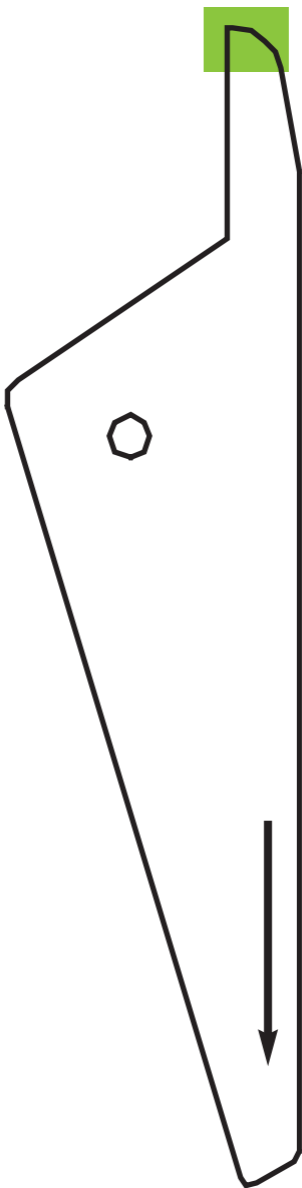

# SR PHONARES®


CAPOLAVORI D'ARTE MODERNA...  
... OLTRE L'ESTETICA E LA FUNZIONE

## SMALL

## SOFT

### YOUTHFUL


# S61

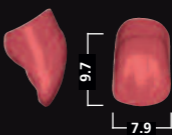

41.6

### UNIVERSAL


# S71

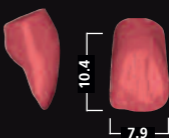

43.6

### MATURE

# S81

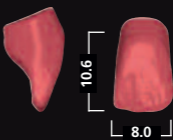


41.8



Larghezza del  
denti anteriore  
in mm

Altezza centrale  
misurata dal  
margine incisale  
al margine  
cervicale

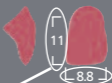

Larghezza  
centrale



**SR PHONEMES NHC****SR PHONEMES***Typ* NHC**SR PHONEMES***Lingual* NHC

Sup.

Inf.

**Small**

soft

S61

L50

NU3 / NL3

LU3/LL3

S71

L51

NU3 / NL3, NU5 / NL5

LU3 / LL3, LU5 / LL5

S81

L50, L51

NU3 / NL3

LU3 / LL3, LU5 / LL5

# SR PHONARES®


CAPOLAVORI D'ARTE MODERNA...  
... OLTRE L'ESTETICA E LA FUNZIONE

## SMALL

## BOLD



### YOUTHFUL

#### B61

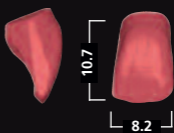



### UNIVERSAL

#### B71

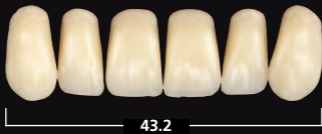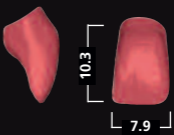

### MATURE

#### B81

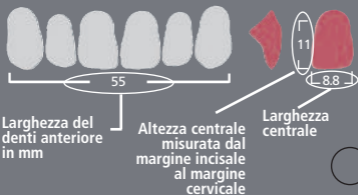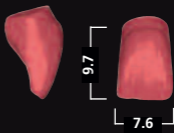

## SR PHONARES NHC

## SR PHONARES

## SR PHONARES

*Typ* NHC

*Lingual* NHC

Sup.

Inf.

### Small

bold

B61

L50, L51

NU3 / NL3

LU3 / LL3

B71

L50, L51

NU3 / NL3, NU5 / NL5

LU3 / LL3

B81

L50, L51

NU3 / NL3

LU3 / LL3


# SR PHONARES®

CAPOLAVORI D'ARTE MODERNA...  
... OLTRE L'ESTETICA E LA FUNZIONE

## MEDIUM SOFT


### YOUTHFUL

# S62

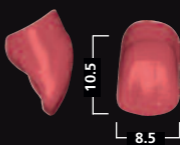




### UNIVERSAL

# S72

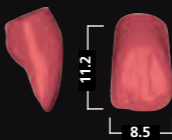

### MATURE

# S82

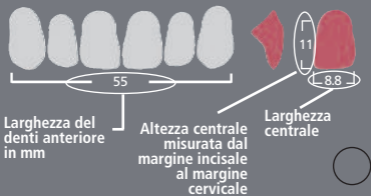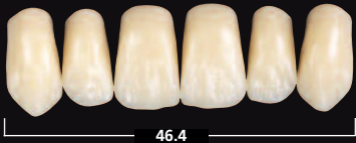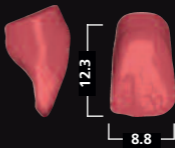

**SR PHONARES NHC****SR PHONARES****SR PHONARES**  
*Typ* NHC*Lingual* NHC

Sup.

Inf.

**Medium**      soft

S62

L51

NU3 / NL3, NU5 / NL5

LU5 / LL5

S72

L51, L53

NU5 / NL5

LU5 / LL5, LU6/ LL6

S82

L51, L53

NU5 / NL5

LU5 / LL5, LU6 / LL6


# SR PHONARES®

CAPOLAVORI D'ARTE MODERNA...  
... OLTRE L'ESTETICA E LA FUNZIONE

## MEDIUM BOLD



### YOUTHFUL

# B62

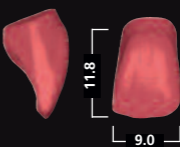


### UNIVERSAL

# B72

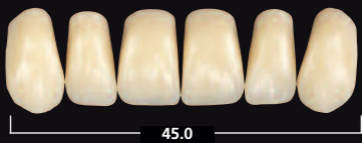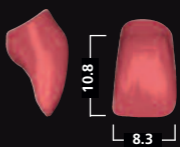

### MATURE

# B82

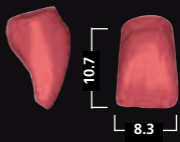

Larghezza del  
denti anteriore  
in mm

Altezza centrale  
misurata dal  
margine incisale  
al margine  
cervicale

Larghezza  
centrale



## SR PHONARES NHC

## SR PHONARES

## SR PHONARES

*Typ* NHC

*Lingual* NHC

Sup.

Inf.

### Medium      bold

B62	L51, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
B72	L51	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
B82	L51, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3, LU5 / LL5

# SR PHONARES®



CAPOLAVORI D'ARTE MODERNA...  
... OLTRE L'ESTETICA E LA FUNZIONE

## LARGE

## SOFT



### YOUTHFUL

# S63

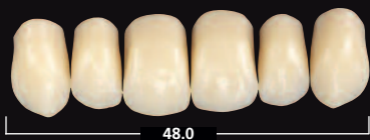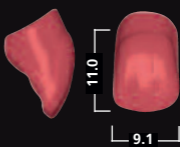



### UNIVERSAL

# S73

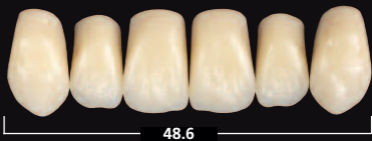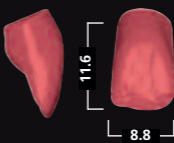

### MATURE

# S83

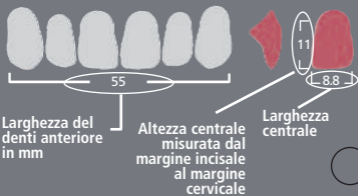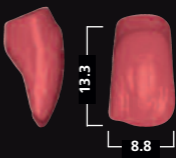

## SR PHONARES NHC

## SR PHONARES

*Typ* NHC

## SR PHONARES

*Lingual* NHC

Sup.

Inf.

## Large

soft

S63

L52, L53

NU5 / NL5

LU6 / LL6

S73

L52

NU5 / NL5, NU6 / NL6

LU6 / LL6

S83

L52, L53

NU5 / NL5, NU6 / NL6

LU6 / LL6

# SR PHONARES®


CAPOLAVORI D'ARTE MODERNA...  
... OLTRE L'ESTETICA E LA FUNZIONE

## LARGE

## BOLD


### YOUTHFUL

# B63

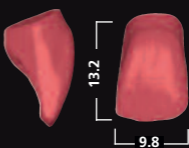


### UNIVERSAL

# B73

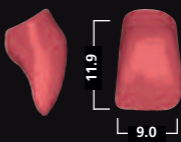

### MATURE

# B83

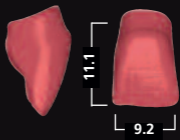

Larghezza del  
denti anteriore  
in mm

Altezza centrale  
misurata dal  
margine incisale  
al margine  
cervicale

Larghezza  
centrale



## SR PHONARES NHC

## SR PHONARES

*Typ* NHC

## SR PHONARES

*Lingual* NHC

Sup.

Inf.

**Large**

**bold**

B63

L52, L53

NU6 / NL6

LU6 / LL6

B73

L52, L53

NU6 / NL6

LU6 / LL6

B83

L52

NU5 / NL5, NU6 / NL6

LU6 / LL6

## PRESENTAZIONE

### SR PHONARES® NHC

- 18 forme denti anteriori superiori
- 4 forme denti anteriori inferiori



### SR PHONARES® Typ NHC

- 3 forme denti posteriori superiori
- 3 forme denti posteriori inferiori



### SR PHONARES® Lingual NHC

- 3 forme denti posteriori superiori
- 3 forme denti posteriori inferiori



# Form Selector

63 1798/0909/US



© Ivoclar Vivadent, Inc., Amherst, USA

## CE 0123

*Produttore*

**Ivoclar Vivadent AG** | Bendererstrasse 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein

Tel. 00423 235 35 35 | Fax 00423 235 33 60 | [www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

*Distribuzione Italia*

**Ivoclar Vivadent s.r.l. & C. s.a.s.** | Via Gustav Flora, 32 | I-39025 Naturno (BZ)

Tel. 0473 / 67 01 11 | Fax 0473 / 66 77 80 | [www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it) | e-mail [info@ivoclarvivadent.it](mailto:info@ivoclarvivadent.it)



**ivoclar**  
**vivadent**<sup>®</sup>

passion vision innovation