

VivaStyle® 10 % | 16 %



La soluzione professionale per un bianco
senza precedenti

*Domande e risposte
sullo sbiancamento dentale*

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

VivaStyle® 10 % | 16 %

Come vorrebbe il Suo sorriso?

Così ...

...o così?

Il sorriso unisce.

Denti belli e sani per
tutta la vita.



La soluzione professionale per un bianco senza precedenti

Denti bianchi e belli, per un sorriso luminoso che conquista: con il trattamento sbiancante professionale oggi si può!

Come funziona?

Qui troverà risposta alle domande più frequenti sullo sbiancamento dentale.

Perché sui miei denti possono formarsi delle macchie?

Diversi fattori pregiudicano il colore dei nostri denti. L'assunzione di particolari alimenti e bevande, medicinali, il fumo, alcune patologie, possono causare la formazione di spiacevoli discromie.

Anche con l'età i nostri denti si scuriscono.



VivaStyle® 10 % | 16 %

Posso fare qualcosa per risolvere questo problema?

Sì: oggi esistono misure molto efficaci. Un metodo di successo ed affidabile è rappresentato dallo sbiancamento dentale professionale, realizzato con il supporto e il controllo del Suo studio dentistico.


Sbiancamento dentale professionale – in cosa consiste?

Uno sbiancante dentale, ad esempio un prodotto della linea VivaStyle di Ivoclar Vivadent, viene applicato sui denti. VivaStyle rilascia ossigeno, che delicatamente agisce schiarendo le discromie dentali.


Vi sono diverse tipologie d'applicazione. Il gel VivaStyle, ad esempio, viene applicato mediante una mascherina realizzata su misura.

VivaStyle Paint On Plus, invece, è un sistema lacca applicato direttamente sui denti con un pennellino. A seconda dell'indicazione e del prodotto utilizzato, il trattamento richiederà dai 10 minuti a 1 ora del Suo tempo, per applicazione.

VivaStyle gel rilascia ossigeno (O₂), che agisce sbiancando delicatamente le discromie.

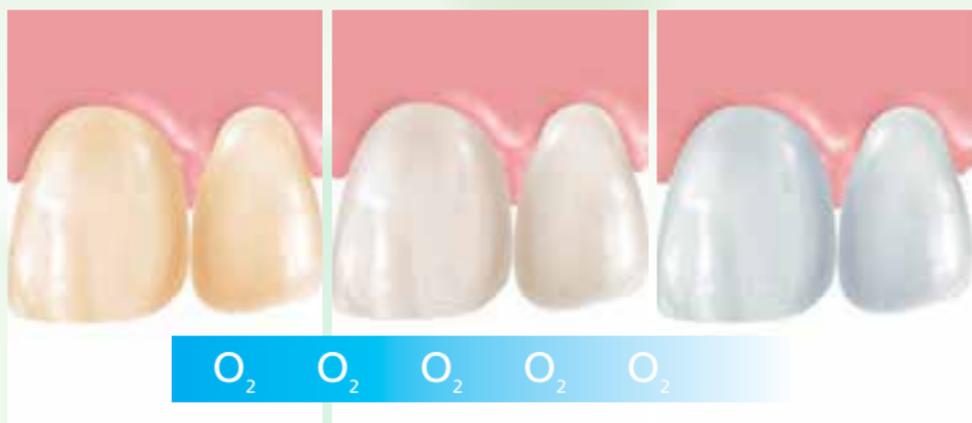

Mascherina riempita con VivaStyle gel
posizionata sull'arcata dentale
superiore.

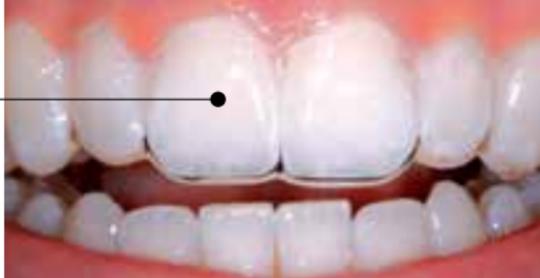

Come funziona lo sbiancamento con mascherina?




Dopo accurato esame da parte del dentista, verrà presa l'impronta dei Suoi denti. Questa servirà per realizzare una mascherina su misura da riempire con il gel sbiancante.

A seconda del preparato utilizzato, il prodotto verrà applicato domiciliariamente o in studio sotto la supervisione del Suo dentista.



VivaStyle® 10 % | 16 %

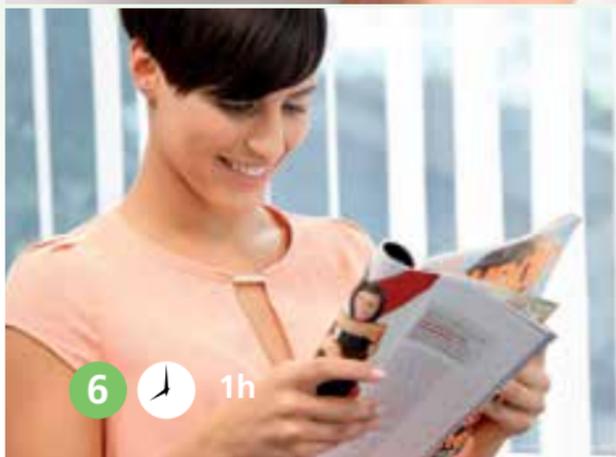

Passo dopo passo

La soluzione professionale per
un bianco senza precedenti



VivaStyle® 10 % | 16 %

Qual è il metodo più indicato al mio caso?

Il Suo dentista La sottoporrà ad accurato esame. In base ai risultati formulerà un piano di trattamento mirato al Suo caso e Le prescriverà il trattamento più idoneo. In primo luogo verrà realizzata una mascherina su misura. In caso dovesse proseguire il trattamento domiciliariamente, riceverà tutte le istruzioni per effettuare la procedura a casa, passo dopo passo. In caso di lacca, il dentista Le mostrerà come usarla.

Seguendo le istruzioni ricevute dal Suo dentista, Lei potrà così realizzare il trattamento comodamente a casa, fino a successiva visita di controllo.

Tutti possono sottoporsi a un trattamento sbiancante?

No. Il trattamento sbiancante non è indicato per particolari categorie di persone: ad esempio bambini o adolescenti sotto i diciotto anni di età, nonché donne in gravidanza o madri in fase di allattamento. Il Suo dentista saprà indirizzarLa sull'opportunità o meno di sottoporsi al trattamento.

Quanto dura il trattamento?

La durata del trattamento dipende dalle cause e dall'entità delle discromie. Di norma, l'azione sbiancante è visibile già dalle prime applicazioni.

Le discromie causate da cibo si schiariscono nell'arco di 10-12 giorni. Se invece le discromie sono legate all'assunzione di medicinali o all'insorgenza di una patologia, il trattamento potrà protrarsi anche per alcuni mesi.



I denti si schiariscono nello stesso modo per tutti?

No, il risultato varia da persona a persona. Esso dipende dal colore dentale naturale originale e dalla causa delle discromie.

Lo sbiancamento dentale professionale è un procedimento sicuro?

Sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, lo sbiancamento dentale è un procedimento delicato, non aggressivo sui denti, che non pregiudica le otturazioni dentali e le mucose del cavo orale.



VivaStyle® 10 % | 16 %

Devo aspettarmi effetti collaterali?

Nel corso del trattamento potranno insorgere sensibilità dentale o irritazione delle mucose orali. Si tratta di sintomi transitori che scompariranno al termine del trattamento.

Posso evitare, o quantomeno ridurre, questi effetti collaterali?

Sì: per tutto il trattamento è consigliabile astenersi dal consumo di agrumi e di bevande acide. Anche una mascherina indossata con precisione e riempita correttamente contribuisce a rendere il trattamento confortevole. Il Suo studio dentistico Le fornirà tutte le istruzioni da seguire scrupolosamente nel corso del trattamento.

Quanto dura l'azione sbiancante?

Dipende dal Suo stile di vita.

L'azione sbiancante potrà durare da due mesi a due anni.

Abitudini alimentari, fumo, età, igiene dentale, sono tutti fattori che influiscono in modo determinante sulla durata dell'azione sbiancante.

Ad esempio, il consumo frequente di caffè, tè e vino rosso, così come il fumo, portano rapidamente alla nuova formazione di discromie.





Una volta sbiancati, come posso mantenere i miei denti bianchi il più a lungo possibile?

Una corretta igiene orale è la base per mantenere i propri denti belli nel tempo. Una regolare detersione professionale dei denti in studio contribuisce a prolungare l'azione dello sbiancamento nel tempo. Qualora i Suoi denti, dopo qualche tempo, mostrassero nuove discromie, potrà ripetere il trattamento con VivaStyle o VivaStyle Paint On. In tal caso, il numero delle applicazioni necessarie saranno di norma molto inferiori rispetto al primo trattamento.



Lo sbiancamento agisce anche sulle otturazioni e le corone?

No. Lo sbiancamento dentale professionale agisce solo sui denti naturali. Il Suo dentista saprà consigliarLa sull'opportunità o meno di sottoporsi a uno sbiancamento dentale, in quanto le otturazioni e le corone in zona estetica potrebbero richiedere una sostituzione.

Esistono otturazioni così bianche da armonizzarsi perfettamente con il colore dei denti sbiancati?

Sì. Ivoclar Vivadent fornisce materiali da otturazione in grado di armonizzarsi perfettamente al colore dei denti sbiancati. Chieda al Suo dentista!

VivaStyle® 10 % | 16 %

Devo consultare il mio dentista in ogni caso?

Sì: il Suo dentista saprà consigliare il prodotto VivaStyle più idoneo a Lei. Dopo accurata visita, formulerà infatti un piano di trattamento personalizzato al Suo caso. Consultare il proprio studio dentistico contribuirà a prevenire l'insorgenza di effetti collaterali e a controllare il risultato del trattamento sbiancante.

Inoltre, Le verranno illustrate le diverse soluzioni professionali per conservare denti bianchi più a lungo nel tempo. E naturalmente quali misure è preferibile seguire a casa.



Si regali un sorriso splendente! Il Suo studio dentistico, Le dirà come fare.

Timbro studio dentistico

2013-11-04_it

Ivoclar Vivadent Srl
via Isonzo 67/69
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 6113555
Fax +39 051 6113565
www.ivoclarvivadent.it


**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation